

Entendendo suas opções de tratamento para incontinência urinária de esforço masculina e disfunção erétil



Incontinência Urinária de Esforço Masculina
e Disfunção Erétil

O que causa a incontinência urinária de esforço (IUE) masculina?

A causa mais comum de IUE em homens é o tratamento do câncer de próstata.¹

Cirurgia, radiação ou uma combinação de terapias que podem afetar o músculo do esfíncter externo e sua funcionalidade. Quase todos os homens vivenciam a IUE imediatamente após a cirurgia do câncer de próstata. Isto é normal e, para a maioria dos pacientes, resolve-se geralmente nos primeiros seis meses de cicatrização.²

Outras causas da IUE masculina:³

- ▶ Tratamento cirúrgico para próstata alargada (HBP) – (RTUP - Ressecção Transuretral da Próstata)
- ▶ Condições como diabetes, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espinha bífida ou acidente vascular cerebral
- ▶ Traumatismo ou cirurgia pélvica

Além das modificações no estilo de vida, existem outras maneiras de tratar a IUE.

As opções de adaptação incluem:⁴

- ▶ Produtos como absorventes ou fraldas
- ▶ Clamps penianos
- ▶ Cateteres penianos internos e externos

As opções de tratamento em longo prazo incluem:⁵⁻¹²

- ▶ Slings
- ▶ Esfíncteres urinários artificiais

Mudanças na anatomia a partir da cirurgia do câncer de próstata:

Ligação da bexiga à uretra




Retirada da próstata



Próstata cancerosa



Sistema de Sling Masculino

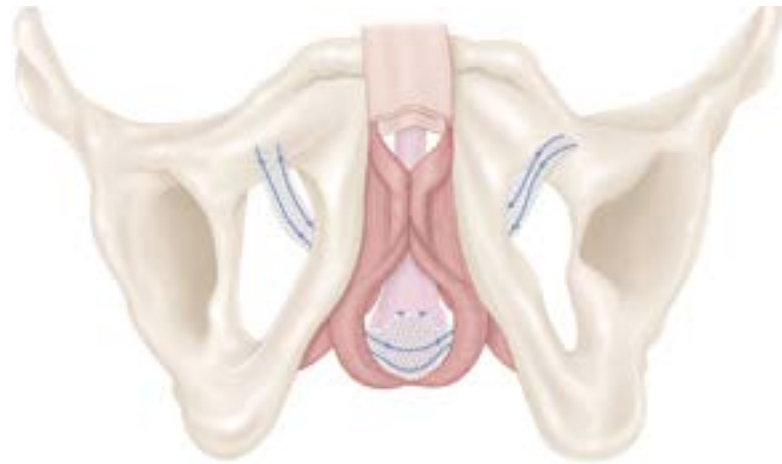

Uma solução minimamente invasiva

O sling atua como uma “malha”⁶, reposicionando e apoiando a uretra para ajudar a restaurar o controle normal da bexiga.¹³

Mensagens Rápidas

- ▶ Destinado para incontinência urinária de esforço masculina
- ▶ Estudos mostram alto êxito e satisfação com o Sling em pacientes com IUE moderada que usam menos de 4 fraldas por dia^{7,14}
- ▶ O sling, feito de malha sintética, é colocado inteiramente dentro do corpo, tornando-o indetectável a outros
- ▶ A maioria dos pacientes torna-se continente imediatamente após o procedimento¹⁵
- ▶ A critério do seu urologista, você pode retomar as atividades diárias normais em 1 a 2 semanas após seu procedimento¹⁶

Resultados satisfatórios

- ▶ **92%** dos pacientes que receberam um Sling passariam pelo procedimento novamente⁷
- ▶ **94%** dos pacientes recomendariam o procedimento com Sling a um amigo⁹

Benefícios do Sling

- ▶ Procedimento minimamente invasivo¹⁷
- ▶ O Sling trabalha sozinho para restaurar sua continência¹⁵
- ▶ O Sling pode ajudar a restaurar sua normalidade e renovar sua confiança

Os possíveis efeitos colaterais incluem, entre outros:¹⁶


- ▶ Falha do dispositivo
- ▶ Retenção urinária
- ▶ Dor pós-operatória
- ▶ Irritação no local da ferida
- ▶ Resposta ao corpo estranho

Sistema de Esfíncter Urinário Artificial

- ▶ O tratamento padrão ouro para IUE masculina¹⁸

Como funciona¹⁹

- ▶ O Sistema de esfíncter urinário artificial é preenchido com solução salina e utiliza o fluido para abrir e fechar o manguito ao redor da uretra. Quando precisar urinar, você aperta e solta a bomba no escroto várias vezes para remover o fluido do manguito. Quando o manguito estiver vazio, a urina pode fluir para fora da bexiga. O manguito é re-preenchido automaticamente em poucos minutos apertando a uretra fechada para restaurar o controle da bexiga.

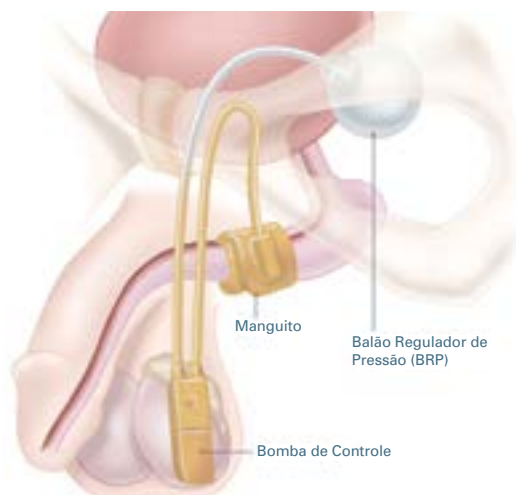

Mensagens Rápidas

- ▶ Concebido para tratar a IUE masculina após a cirurgia da próstata²⁰
- ▶ O sistema pode tratar com sucesso todos os níveis de IUE masculina
- ▶ Concebido para restaurar discretamente o processo natural de controle urinário
- ▶ Imita um esfíncter saudável, permitindo que você urine quando desejado²⁰
- ▶ É manuseado por você²⁰
- ▶ Requer boa capacidade cognitiva e destreza manual²⁰

Resultados satisfatórios

- ▶ Estudo de satisfação dos pacientes do Journal of Urology²¹
 - ▶ **90%** relataram satisfação
 - ▶ **92%** colocariam novamente o Sistema de Esfíncter Urinário Artificial
 - ▶ **96%** recomendariam o implante do Sistema de Esfíncter Urinário Artificial a um amigo
- ▶ Os estudos de longo prazo publicados mostram que 82% a 90% dos pacientes usam de 0 - 1 fraldas por dia após seu procedimento¹⁰⁻¹²

Benefícios do Sistema de Esfíncter Urinário Artificial

Concebido para tratar a IUE masculina devido a um músculo esfíncter enfraquecido ou a incapacidade do esfíncter de fechar e impedir o vazamento de urina após a cirurgia da próstata²⁰

- ▶ Proporciona à maioria dos homens a capacidade de alcançar a continência²²
- ▶ O Sistema de Esfíncter Urinário Artificial pode ajudar a restaurar sua normalidade e renovar sua confiança

Os possíveis efeitos colaterais incluem, entre outros:²⁰

- ▶ Mau funcionamento ou falha do dispositivo, o que pode exigir cirurgia de revisão
- ▶ Erosão da uretra na área do manguito
- ▶ Retenção urinária
- ▶ Dor pós-operatória



O que é disfunção erétil (DE)?

A DE é definida como a incapacidade persistente de alcançar ou manter uma ereção firme o suficiente para ter relações sexuais.²³

Algumas causas comuns são:

- ▶ Diabetes²⁴
- ▶ Doença cardiovascular (pressão alta, cardiopatia)²⁴
- ▶ Tratamento do câncer de próstata²⁴
- ▶ Cirurgia (próstata, bexiga, cólon, reto)
- ▶ Medicamentos (pressão arterial, antidepressivos)²⁴
- ▶ Opções de estilo de vida (tabagismo, álcool em excesso, obesidade, falta de exercício)²⁴
- ▶ Lesões na medula espinhal²⁴
- ▶ Problemas hormonais²⁴

As opções de tratamento incluem:²⁵


- ▶ Medicamentos orais
- ▶ Dispositivos de ereção a vácuo
- ▶ Implantes penianos
- ▶ Injeções
- ▶ Supositórios intrauretrais

DISFUNÇÃO ERÉTIL

Implante Peniano Inflável 3 Peças

Implante Peniano Inflável

- ▶ Par de cilindros implantados no pênis
- ▶ Bomba dentro do escroto
- ▶ Reservatório de solução salina no abdômen
- ▶ Ativado ao apertar a bomba, para que o fluido se mova a partir do reservatório, enchendo os cilindros para gerar uma ereção
- ▶ O botão de deflação na bomba move a solução salina dos cilindros de volta ao reservatório

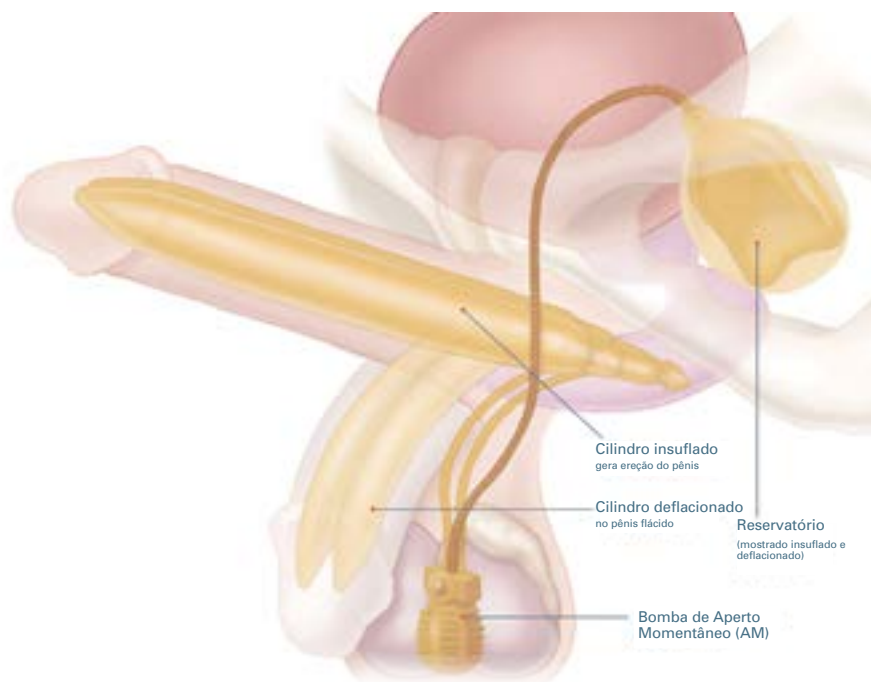

Sobre o dispositivo


- ▶ Totalmente contido no corpo²⁶
- ▶ Concebido para ser similar a uma ereção natural²⁷
- ▶ O dispositivo é insuflado para proporcionar rigidez e deflacionado para ocultação²⁶
- ▶ Os cilindros expandem-se em largura (todos os cilindros do Implante) e comprimento (dependendo do tipo de implante)
- ▶ Requer alguma destreza manual²⁷
- ▶ A ereção que você tem com este dispositivo pode ser diferente da sua ereção natural e original²⁶
- ▶ Perda da capacidade natural de ter uma ereção²⁶

Resultados satisfatórios

- ▶ **98%** dos pacientes relataram suas ereções como excelentes ou satisfatórias após a cirurgia²⁸
- ▶ **92%** dos pacientes relataram a atividade sexual com o implante como excelente ou satisfatória²⁸

Implante Peniano Inflável²⁹

- ▶ Par de cilindros preenchidos com fluido implantados no pênis
- ▶ Bomba implantada no escroto
- ▶ Aperte e solte repetidamente a bomba para insuflar
- ▶ Dobre o pênis para baixo para deflacionar

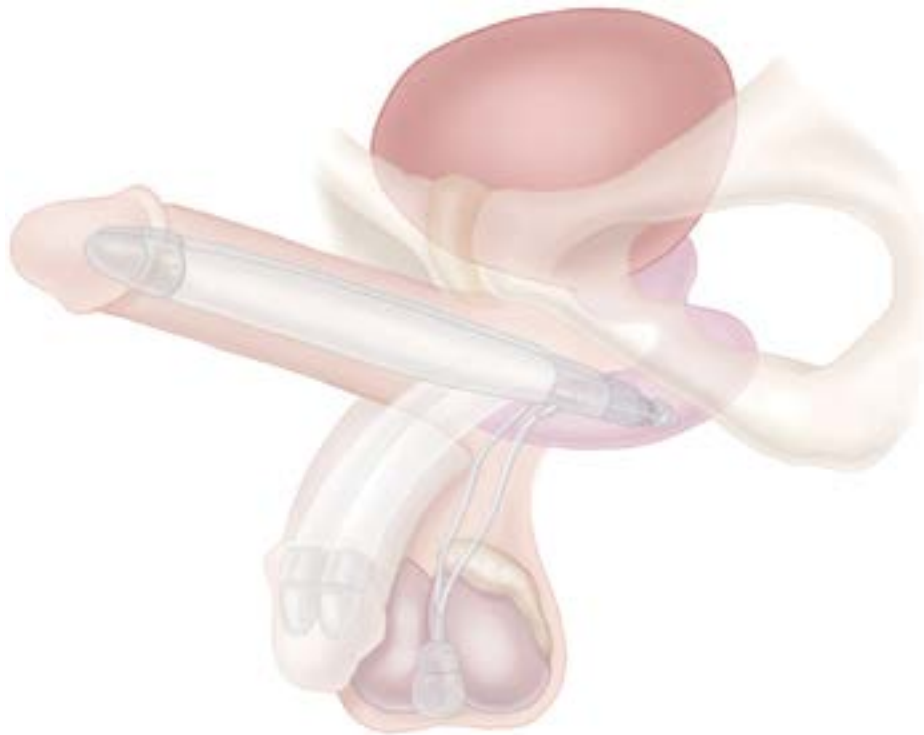

Sobre o dispositivo


- ▶ Totalmente contido no corpo²⁹
- ▶ Concebido para ser fácil de usar
- ▶ Deflação em uma única etapa²⁹
- ▶ Oferece ereção firme e rígida sem um reservatório separado
- ▶ Requer alguma destreza manual²⁹
- ▶ Os cilindros permanecem parcialmente preenchidos com fluido quando deflacionados
- ▶ A ereção que você tem com este dispositivo pode ser diferente da sua ereção natural e original²⁹
- ▶ Perda da capacidade natural de ter uma ereção²⁹

Resultados satisfatórios

- ▶ **96%** passariam pelo procedimento novamente³⁰
- ▶ **93%** dos pacientes recomendariam o dispositivo a outros³⁰
- ▶ **91%** das parceiras consideraram o Implante altamente satisfatório³⁰

Implante Peniano Ocultável ³¹

- ▶ Par de cilindros implantados no pênis
- ▶ Sempre rígido, mas flexível o bastante para posicionar para cima ou para baixo
- ▶ Posicione o pênis para cima para relações sexuais ou dobre-o para baixo quando não desejar uma ereção

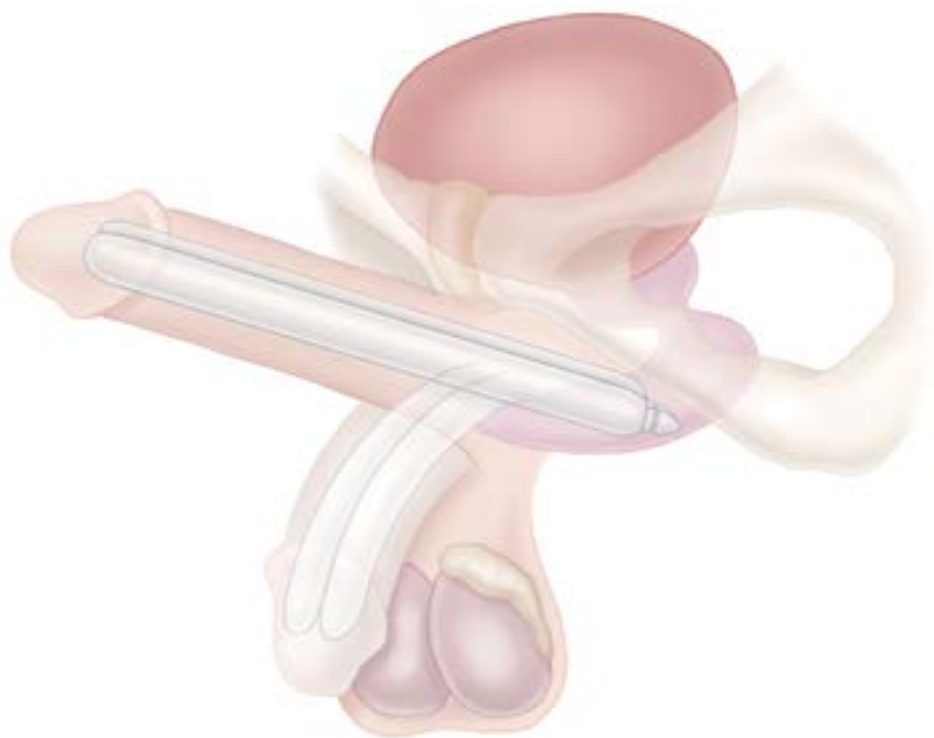

Sobre o dispositivo³¹

- ▶ Totalmente contido no corpo
- ▶ Concebido para fácil utilização por você e sua parceira
- ▶ Uma opção para homens com destreza limitada
- ▶ Permanece firme quando não utilizado
- ▶ A ereção que você tem com este dispositivo pode ser diferente da sua ereção natural e original
- ▶ Perda da capacidade natural de ter uma ereção



Características de um implante peniano:

- ▶ Concebido para ser uma solução permanente para a DE
- ▶ Espontâneo - você pode fazer sexo quando estiver disposto
- ▶ Uma vez ativada, a ereção pode durar o tempo que você desejar.
- ▶ Totalmente contido dentro do corpo - ninguém sabe que você tem um, a menos que você lhes diga
- ▶ Concebido para sensação natural durante a relação sexual
- ▶ Alta satisfação dos pacientes e das parceiras relatada^{28,32,33}
- ▶ Normalmente não interfere na ejaculação ou no orgasmo^{28,34}

Alguns riscos de um implante peniano incluem^{27,35}

- ▶ Irá impossibilitar ereções naturais ou espontâneas, assim como outras opções de tratamento intervencionista
- ▶ Pode haver falha mecânica do implante, o que pode exigir uma cirurgia de revisão.
- ▶ A incapacidade de avaliar e tratar prontamente a erosão pode resultar em um agravamento substancial da condição, levando à infecção e perda de tecido
- ▶ Dor (normalmente associada ao processo de cicatrização)
- ▶ Homens com diabetes, lesões na medula espinhal ou feridas abertas podem ter um maior risco de infecção.
- ▶ Existe um risco de 1-2,5% de infecção com o implante peniano inflável³⁶

Informações importantes sobre segurança do paciente

Cuidado: A lei Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por, ou a pedido de, um médico.

Seu médico é sua melhor fonte de informações sobre os riscos e benefícios do Sistema de Controle Esfíncter Urinário Artificial. Converse com seu médico para obter uma lista completa de riscos, advertências e informações importantes sobre segurança.

O Sistema de Controle Esfíncter Urinário Artificial é destinado para uso no tratamento da incontinência urinária de esforço masculina (deficiência intrínseca do esfíncter) após a cirurgia da próstata.

Homens com diabetes, lesões na medula espinhal ou infecções cutâneas podem ter um maior risco de infecção. Alguns dispositivos Esfíncter Urinário Artificial contêm um antibiótico. O dispositivo pode não ser adequado para pacientes alérgicos aos antibióticos contidos no dispositivo (rifampicina, minociclina ou outras tetraciclinas) ou portadores de lúpus sistêmico.

Os riscos potenciais podem incluir: mau funcionamento/falha do dispositivo levando à cirurgia adicional, desgaste/perda de tecido (erosão do dispositivo/tecido), incapacidade de urinar (retenção urinária), infecção e dor/ferimentos. MH-545611-AA

Cuidado: A lei Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por, ou a pedido de, um médico.

Seu médico é sua melhor fonte de informações sobre os riscos e benefícios do Sistema de Sling. Converse com seu médico para obter uma lista completa de riscos, advertências e informações importantes sobre segurança.

O Sistema de Sling é destinado para o tratamento da incontinência urinária de esforço (IUE) masculina. Os riscos potenciais podem incluir incapacidade de urinar (retenção urinária), retorno à incontinência e dor. MH-547816-AA

Cuidado: A lei Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por, ou a pedido de, um médico.

Seu médico é sua melhor fonte de informações sobre os riscos e benefícios do Implante Peniano com Prótese Peniana Inflável. Converse com seu médico para obter uma lista completa de riscos, advertências e informações importantes sobre segurança.

O Implante Peniano com Prótese Peniana Inflável é destinado para uso no tratamento da disfunção erétil masculina (impotência). Implantar uma prótese peniana danificará ou destruirá qualquer capacidade restante de se ter uma ereção natural, bem como impossibilitar outras opções de tratamento.

Homens com diabetes, lesões na medula espinhal ou infecções cutâneas podem ter um maior risco de infecção. O implante pode resultar em encurtamento, curvatura ou cicatrizes penianas. Alguns dispositivos de Implante Peniano Inflável contêm um antibiótico. O dispositivo pode não ser adequado para pacientes alérgicos aos antibióticos contidos no dispositivo (rifampicina, minociclina ou outras tetraciclinas) ou portadores de lúpus sistêmico.

Os riscos potenciais podem incluir: mau funcionamento/falha do dispositivo levando à cirurgia adicional, migração do dispositivo potencialmente levando à exposição através do tecido, infecção por desgaste/perda de tecido (erosão do dispositivo/tecido), insuflação não intencional do dispositivo e dor/ferimentos. MH-545411-AA

Cuidado: A lei Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por, ou a pedido de, um médico.

Seu médico é sua melhor fonte de informações sobre os riscos e benefícios da Prótese Peniana Inflável. Converse com seu médico para obter uma lista completa de riscos, advertências e informações importantes sobre segurança.

A Prótese Peniana Inflável é destinada para uso no tratamento da disfunção erétil masculina (impotência). Implantar uma prótese peniana danificará ou destruirá qualquer capacidade restante de se ter uma ereção natural, bem como impossibilitar outras opções de tratamento.

Homens com diabetes, lesões na medula espinhal ou infecções cutâneas podem ter um maior risco de infecção. O implante pode resultar em encurtamento, curvatura ou cicatrizes penianas.

Os riscos potenciais podem incluir: mau funcionamento/falha do dispositivo levando à cirurgia adicional, migração do dispositivo potencialmente levando à exposição através do tecido, infecção por desgaste/perda de tecido (erosão do dispositivo/tecido), insuflação não intencional do dispositivo e dor/ferimentos. MH-545613-AA

Cuidado: A lei Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por, ou a pedido de, um médico.

Seu médico é sua melhor fonte de informações sobre os riscos e benefícios da Prótese Peniana Ocultável. Converse com seu médico para obter uma lista completa de riscos, advertências e informações importantes sobre segurança.

A Prótese Peniana Ocultável é destinada para uso no tratamento da disfunção erétil masculina (impotência). Implantar uma prótese peniana danificará ou destruirá qualquer capacidade natural restante de se ter uma ereção natural, bem como impossibilitar outras opções de tratamento.

Homens com diabetes, lesões na medula espinhal ou infecções cutâneas podem ter um maior risco de infecção. O implante pode resultar em encurtamento, curvatura ou cicatrizes penianas.

Informações adicionais são fornecidas nos Manuais para o Paciente do produto, disponibilizados por meio do seu médico MH-547820-AA

Todas as imagens são de propriedade da Boston Scientific. Todas as marcas comerciais são de propriedade dos seus respectivos proprietários.

• "CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device. Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. Please check availability with your local sales representative or customer service. Consult your physician for usage. Boston Scientific Corporation© or its affiliates. All rights reserved."

• "The content of this PSST material is for Information Purposes only and not meant for product promotion or medical diagnostic. This information does not constitute medical or legal advice, and Boston Scientific makes no representation or warranty regarding this information or its completeness, accuracy or timeliness. Accordingly, Boston Scientific strongly recommends that you consult with your physician on all matters pertaining to your health or to address any questions."

URO – 745502 – PT BR AA Jan/2020